

## INSTRUCCIONES DE USO

Miren® es una solución oftálmica que confiere protección frente a los rayos UV elaborada a base de vitamina B<sub>2</sub> (riboflavina), vitamina E TPGS, MSM, aminoácidos y ácido hialurónico 0,1%. Actúa como barrera frente a la luz azul y a la radiación UV en la superficie ocular y mejora la lubricación de ésta, contribuyendo a proteger el epitelio corneal de diferentes fuentes de agresión.

El hialuronato de sodio interactúa de forma mecánica con la capa mucínica de la película lagrimal, reteniendo agua y promoviendo una mayor estabilidad de la superficie del ojo. La acción sinérgica de los aminoácidos, además de la regulación del pH y de la osmolaridad lagrimal, tiene una función nutritiva para la superficie ocular, mejorando la protección del epitelio frente a las agresiones causadas por la luz azul y la radiación UV. La vitamina E TPGS favorece la humectabilidad de la superficie ocular.

La solución oftálmica ejerce un efecto barrera, protector y antioxidante frente al daño ocasionado por la radiación UV y acelera el proceso natural de reparación.

Miren® es un Equipo de Protección Individual certificado y exclusivo que protege la córnea, el cristalino y la retina frente a la radiación UV, la luz azul, las fuentes de luz artificial y la exposición prolongada al sol, evitando daños como fotoqueratitis, fotoqueratoconjuntivitis, cataratas y DMAE.

Miren® mantiene la superficie ocular hidratada y protegida.

Miren® es compatible con lentes de contacto.

Miren® es un Equipo de Protección Individual.

## INDICACIONES

Miren® ejerce un efecto protector frente a los efectos nocivos de la radiación UV, de la luz azul, de la luz del sol y de la luz artificial.

Miren® previene la aparición de fotoqueratitis y fotoqueratoconjuntivitis por la exposición a la radiación UV.

Miren® previene la aparición de cataratas por la exposición a la radiación UV.

Miren® previene el envejecimiento macular causado por la exposición a la luz azul y a la radiación UV.

Miren® está indicado en caso de exposición prolongada a ordenadores, terminales de vídeo y televisores.

Miren® está indicado en caso de exposición intensa y prolongada a los rayos UV.

Miren® está indicado para actividades y deportes al aire libre.

Miren® está indicado para la exposición a entornos con altos niveles de radiación UV (montaña, mar, zonas tropicales, etc.).

Su aplicación no afecta a la agudeza visual ni a la percepción cromática y no modifica la sensibilidad al contraste.

## MODO DE USO

1. Abrir el envase y retirar el tapón protector.
  2. Apretar suavemente el envase y dejar caer una o dos gotas en cada ojo. Repetir este paso si es necesario.
- Cerrar el envase después de su uso.

## COMPOSICIÓN

Fosfato sódico de riboflavina, vitamina E TPGS, hialuronato de sodio, MSM (metilsulfonilmetano), L-prolina, L-glicina, clorhidrato de L-lisina, L-leucina, fosfato dibásico de sodio dodecahidratado, cloruro de sodio, agua p.p.i. Sin conservantes.

## PRECAUCIONES

- Leer detenidamente las Instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
- El producto es solo para uso oftálmico.
- El producto solo debe ser utilizado por una única persona.
- Durante la aplicación, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con la punta del envase.
- No utilizar en caso de intolerancia o hipersensibilidad conocida a sus componentes.
- En caso de experimentar algún efecto adverso durante el uso del producto, deje de utilizarlo y consulte a un oftalmólogo.
- No utilizar el producto si la caja está dañada o no está perfectamente cerrada antes del primer uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No tirar el envase en el medio ambiente después de su uso.

## ENVASE

Envase multidosis de 10 ml sin conservantes.

## CONSERVACIÓN

El producto puede utilizarse hasta 2 meses después de la primera apertura. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

## PERÍODO DE VALIDEZ

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y conservado correctamente. Conservar la caja y las Instrucciones de uso para disponer de toda la información del producto.

## ■ IROS RC

Via A. d'Isernia, 31  
80122 Napoli (Italia)

**DISTRIBUIDO POR:**  
**BRILL PHARMA, S.L.**

C/ Munner, 10  
08022 Barcelona (España)  
www.brillpharma.com

**CE** 0373

Producto  
Sanitario

**STERILE** **A**