



003614060

CLASE 8.ª

[Logo:] Boson

COVID-19

Coronavirus

Tarjeta para Test Rápido de Antígeno SARS-CoV-2

[imagen coronavirus]

Mediante la utilización de un hisopo nasal para obtener la muestra de fluido, las pruebas de antígenos pueden ofrecer resultados en cuestión de minutos. Dado que las pruebas de antígenos son más rápidas y menos costosas que las pruebas moleculares, los expertos las consideran más prácticas para su utilización en grupos grandes de personas. Debido a la alta especificidad de las pruebas antigénicas, el resultado positivo de una prueba antigénica se considera muy fiable.

[Imágenes de la tarjeta, hisopo, solución para extracción de muestra e hisopo]

Rápido, fácil y cómodo

Resultados en 15-20 minutos, fácil de usar No requiere instrumentos ni destrezas especiales

Almacenamiento

Almacenamiento a temperatura ambiente y vida útil de 18 meses

Tipo de hisopo para la prueba

Pueden utilizarse hisopos nasofaríngeo

No. Cat.	Nombre del Producto	No. por Kit
1N40C5	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	20
1N40C5-2	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	1

IRATXE BILBAO ZUBIAUR
Traductora - Interprete Jurada de Inglés
Nº 9376



CLASE 8.ª



003614061

Procedimiento

[en el documento original aparecen 5 imágenes en las que se detalla el procedimiento a seguir para la realización del test]

[Imagen 1:] Añada 8 gotas de la solución tampón (0,25 ml aproximadamente)

[Imagen 2:] Introduzca el hisopo y hágalo girar para mezclar.

[Imagen 3:] [Se muestra imagen del tubo y una flecha roja a cada lado indicando "Presione"] Presione el tubo y retire la solución del hisopo.

[Imagen 4:] Coloque la boquilla en el tubo

[Imagen 5:] [se muestra un dibujo en el que se indica cómo colocar la muestra en la tarjeta. Además se ofrece la imagen de un reloj en el que se indica "0 minutos"- "15-20 minutos"] Añada 3 gotas de muestra y espere 15-20 minutos.

Interpretación de los resultados

[Imagen 1:] Tarjeta en la que aparecen dos bandas horizontales de color rojo junto a las letras "C" y "T". Bajo la tarjeta se lee la palabra "Positivo"

[Imagen 2:] Tarjeta en la que aparece una banda horizontal de color rojo junto a la letra "C". Bajo la tarjeta se lee la palabra "Negativo"

[Imagen 3:] En una de las tarjetas aparece una banda horizontal de color rojo junto a la letra "T". En la otra tarjeta no aparece ninguna banda horizontal. Bajo las tarjetas se lee la palabra "Inválido"

Boson

XIAMEN BOSON BIOTECH CO., LTD.

90-94 Tianfeng Road,
Jimei North Industrial Park,
Xiamen 361021, P. R. China

Tel: 86-592-3965101/3576704
E-mail: info@bosonbio.com
Web: www.bosonbio.com

Para obtener más información contacte con su agente.

210127


D^a. Iratxe Bilbao Zubiaur, Traductora e Intérprete Jurado de Inglés, nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ESPAÑOL de un documento redactado en INGLÉS.
En Llodio, a 08 de mayo de 2021

Ms Iratxe Bilbao Zubiaur-Sworn Translator and Interpreter of English appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs- hereby certifies that the preceding translation is a true and complete translation into SPANISH of a document in ENGLISH.
Signed in Llodio, on May 08, 2021

IRATXE BILBAO ZUBIAUR
Traductora - Intérprete Jurada de Inglés
Nº 9376

COVID-19

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

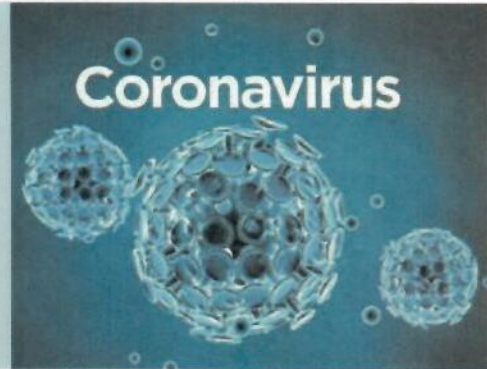

Using a nasal swab to get sample fluid, antigen tests can produce results in minutes. Because these tests are faster and less expensive than molecular tests are, experts consider antigen tests more practical to use for large numbers of people. Since the antigen test can be high specificity, a positive antigen test result is considered very accurate.



● Fast, Easy and Convenient

Results in 15-20 minutes, simple to use
Requires no instruments and special skills

● Storage

Room temperature storage & 18-month shelf life


● Swabs Test

Nasopharyngeal swab can be used


IRATXE BILBAG ZUBIAUR
Traductora - Interprete Jurada de Inglés
Nº 9376

Cat. No.	Product Name	No. per Kit
1N40C5	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	20
1N40C5-2	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	1

Test Procedure

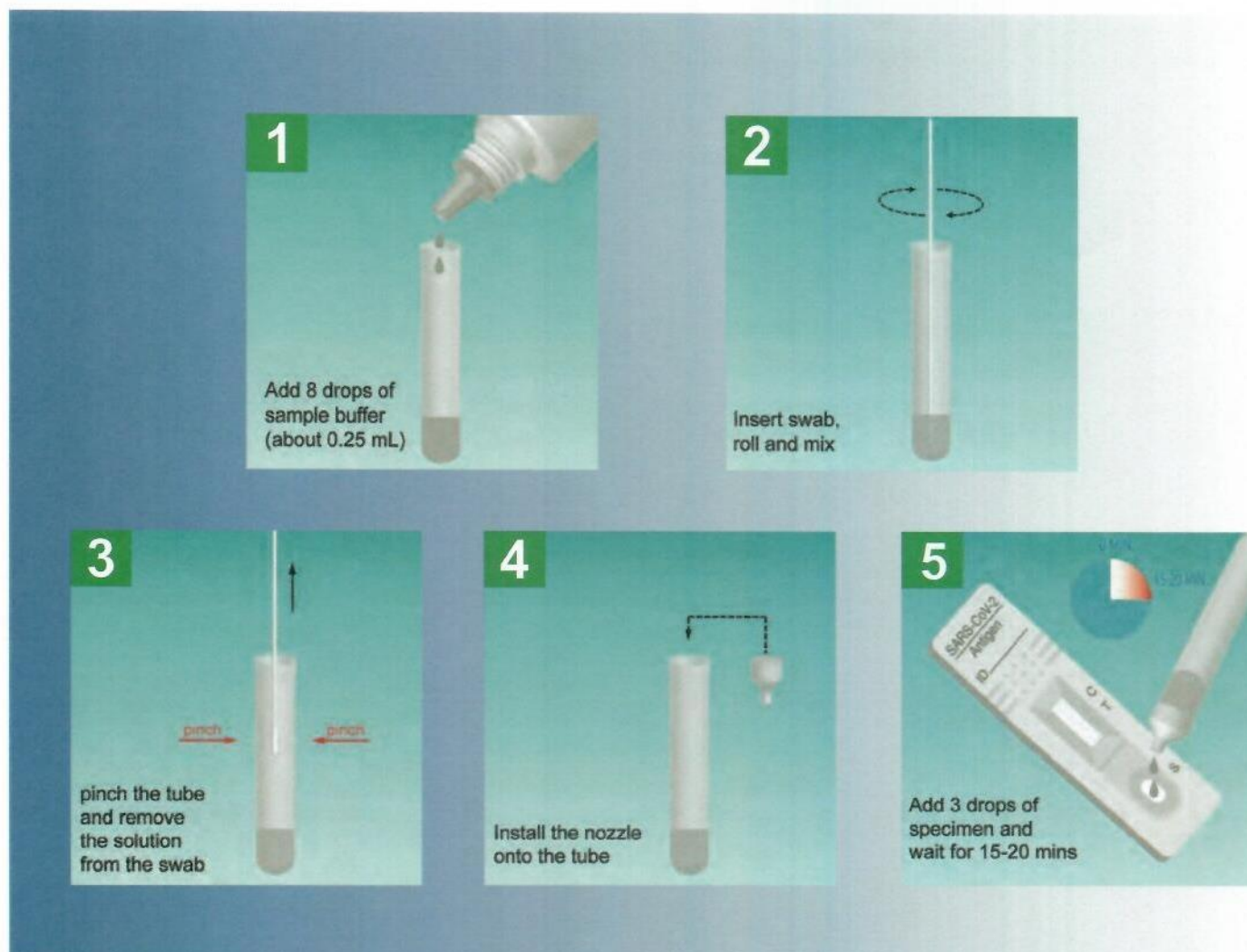

Interpretation of Results

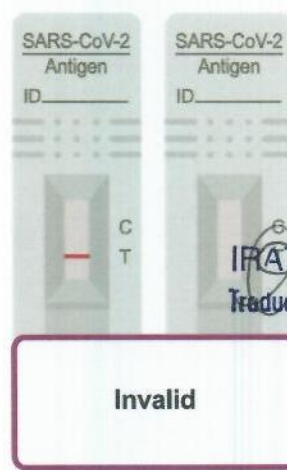

IRATXE BILBAC ZUBIAUR
Traductora - Interprete Jurada de Inglés
Nº 9376

BOSON

XIAMEN BOSON BIOTECH CO., LTD.

*Please contact us or
your agent for details.*

90-94 Tianfeng Road,
Jimei North Industrial Park,
Xiamen 361021, P. R. China

Tel: 86-592-3965101/3576704
E-mail: info@bosonbio.com
Web: www.bosonbio.com